

PRODUKTSPEZIFIKATION (DE)

REF 790400 WÄRMESCHRANK FÜR CEDERROTH AUGENDUSCHE



1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG UND VORGESEHENE ANWENDUNG

Wärmeschränk aus expandiertem Polypropylen (EPP) mit einem über Thermostat gesteuerten Heizelement.

Der Wärmeschränk ist zur Lagerung von zwei Flaschen Cederroth Augendusche (REF. 7251) in kalten Umgebungen vorgesehen. Bei einer Umgebungstemperatur von -20 °C bis +20 °C beträgt die Temperatur der Augenspülflüssigkeit im Schränk +20 °C (±2 °C).



Der Wärmeschränk schaltet automatisch zwischen 12 V DC und 24 V DC um. (für 230 V ist ein Transformator erforderlich).

Ist der Schränk längere Zeit eingeschaltet, beispielsweise in einem geparkten Fahrzeug, überwacht ein Spannungswächter die Eingangsspannung und schaltet den Wärmeschränk automatisch ab, wenn die Eingangsspannung unter einen festgelegten Grenzwert sinkt.

Hinweis: Damit das Heizelement in einem Fahrzeug mit ausgeschaltetem Motor Wärme abgeben kann, muss die Fahrzeugsteckdose weiterhin Spannung bereitstellen.

Bei Bedarf kann der Schränk mit einem dünnen Versiegelungsdraht versiegelt werden. Es muss jedoch jederzeit möglich sein, die Versiegelung ohne zusätzliches Werkzeug zu brechen.

Lagerungsbedingungen

Der Wärmeschränk muss geschützt vor extremen Wetterverhältnissen (Regen, Schnee usw.) angeordnet werden.

2. INHALT

Wärmeschränk mit Kabel und Stecker (Typ MW113301) (1 Stck.)

Produktspezifikation (1 Stck.)

3. TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Schränk: Expandiertes Polypropylen (EPP).
Schlagfest. Hohe Chemikalienbeständigkeit. Beständig gegenüber Temperaturen bis zu 130 °C.
Abmessungen: 276 x 315 x 130 mm (B x H x T)
Elektrokabel (2 m) mit Stecker für Zigarettensanzünderanschlüsse (12 V/24 V). Bei Entfernung des roten Adapters (Bajonettverbindung) passt der Stecker auch in 12 mm-Anschlüsse (12 V/24 V).

Heizelement: Aluminiumprofil mit Leiterplatte.
Thermostat, der die Temperatur auf +20 °C (±2°C) hält, wenn die Umgebungstemperatur zwischen -20 °C und +20 °C liegt.
Externe Spannung: 12 V oder 24 V DC. **Hinweis:** 230 V nur mit Transformator.
Leistung: 30 W. Sekundärleistung mit Transformator min. 17 W, 12,5–16 VDC oder 25–30 VDC.
Leuchtdioden, die Leistung EIN, 12 V, 24 V oder zu niedrige Eingangsspannung anzeigen.
Zugelassen nach den EMV-Normen EN 61000-6-3:2001, EN 55022 Class B, EN 61000-6-2:2001, EN 61000-4-2, -3, ISO/TR 7637-1-2 Pulse 5.



Fassung: 06
Herausgegeben am:
14.11.2025

PRODUKTSPEZIFIKATION (DE)

REF 790400 WÄRMESCHRANK FÜR CEDERROTH AUGENDUSCHE



Hinweise zum Recycling:

Den Schrank als Kunststoff und die Metallplatte als Metall recyceln. Das Netzkabel, den Stecker und die Leiterplatte als Elektronikschrott recyceln. Märkte außerhalb Schwedens – die Elektroteile an Orkla Wound Care AB zurücksenden. Versandetiketten können per E-Mail an firstaid@cederroth.com angefordert werden.

4. LOGISTIKINFORMATIONEN

	CU	SKU	Palette
GTIN:	-	7310807904009	-
Inhalt:	1 Schrank	1 CU	8 SKU/Lage x 6 Lagen
Größe (B x L x H mm):	276 x 130 x 315	357 x 289 x 145	Palette 800 x 1200 x 145
Bruttogewicht:	990 g	1229 g	84,3 kg
Verpackungsmaterial:	Kunststoff 30 g	Karton 239 g	-



Fassung: 06
Herausgegeben am:
14.11.2025